

Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Вальгусная шина

С шарниром —
нога остается
подвижной!



Перед применением прочтите, пожалуйста, информацию о продукте!

Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Шина Hallufix®

- Помогает при Hallux Valgus (неправильное положение большого пальца стопы): отклонение основного сустава большого пальца стопы от прямого положения
- Применяется при легком и среднем, еще корректируемом неправильном положении большого пальца стопы, а также после операций Hallux Valgus
- Оказывает корректирующее действие на сустав большого пальца. при наложении на ночь шина растягивает сжатые мягкие ткани (капсулу) основного сустава большого пальца стопы. Таким образом можно постепенно скорректировать неправильное положение сустава
- Закрепляет результаты коррекции неправильного положения большого пальца стопы, произведенной оперативным путем

Принцип действия

- исправляет неправильное положение большого пальца
- профилактическое и постоперационное применение
- сокращает продолжительность реабилитационного периода
- снижает риск возникновения артроза
- сохраняется подвижность стопы

Hallufix®


INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Набор шины состоит из:

- 1 шины с шарниром и отклоняющимися пазами
 - 1a шины большого пальца стопы
 - 1b шины плюсны
- 2 бандажа большого пальца стопы
- 3 бандажа плюсны
- 4 1х толстой боковой подушечки (закрепленной на заводе)
 - 4a 1х тонкой боковой подушечки
(по желанию может применяться альтернативно)
- 5 пелота

Шина имеет универсальный размер, носится слева и справа.

Расходные материалы (бандажи, пелот и боковые подушечки) имеются в наборе дополнительных принадлежностей **Hallufix®** (см. стр. 17).

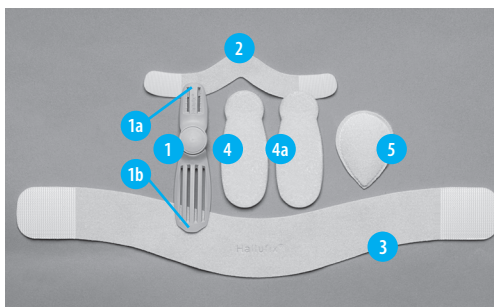


На обеих сторонах биндажа большого пальца имеются **застежки-липучки, которые при необходимости можно укоротить с помощью ножниц.**

Hallufix®


INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Заправка биндажа большого пальца

Положите перед собой биндаж большого пальца стопы, как показано на рис. 1. Конец липучки (X1) биндажа большого пальца (2) продевается снизу через правую прорезь подпальцевой пластины (1a) и закрепляется на биндаже большого пальца (2).

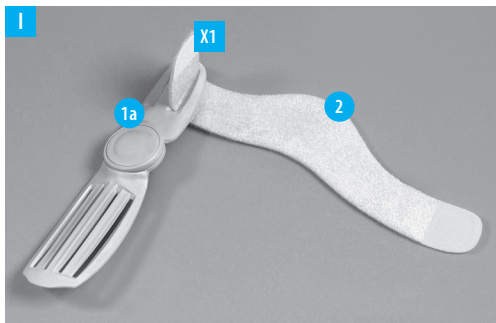

(рис. II) → Затем продевается второй конец липучки (X2) снизу через левую прорезь подпальцевой пластины (1а) и закрепляется на биндаже большого пальца (2).

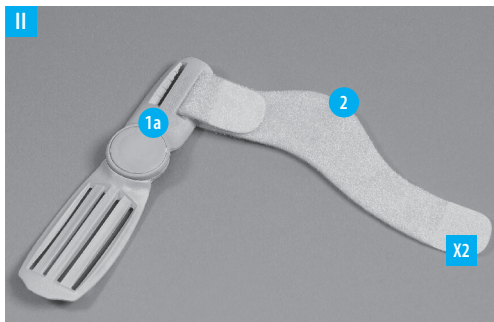



Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS


Заправка биндажа плюсны в шину

Положите перед собой шину (1) и биндаж плюсны (3), как показано на рис. III. Биндаж плюсны продевается сверху через отклоняющий паз (R1), затем - снизу через отклоняющий паз (R2) → (рис. IV) и закрепляется на шине плюсны (3) V → (рис. V)

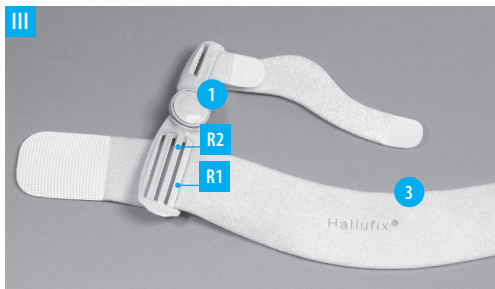

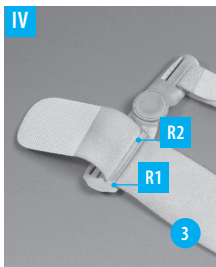

Другой конец биндажа плюсны (3) продевается сверху через отклоняющий паз (L1) (рис. VI), выводится назад через паз (L2) и затем закрепляется на (3) (рис. VI).

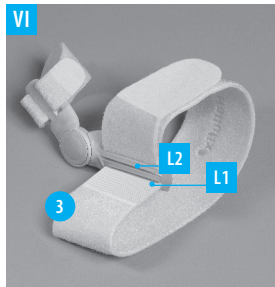


Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Боковая подушечка

Толстая боковая подушечка (рис. VII) на заводе в оригинальной упаковке прочно закреплена на шине с помощью липучки. Если же Вам придется (например, после стирки) закреплять ее самостоятельно, следите, пожалуйста, за тем, чтобы боковая подушечка размещалась на более длинной части шины; форма подушечки адаптирована к форме шины.

VII

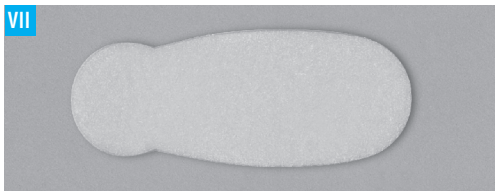

Если необходимо уменьшить толщину материала, подкладываемого в области косточки, просто замените толстую боковую подушечку на тонкую.

Наложение шины

После заправки биндажей можно накладывать шину (рис. VIII) и закреплять на ноге (рис. IX) с помощью биндажей большого пальца и плюсны.



Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Укладка пелота для плюсны

Пелот укладывается стороной с липучкой к биндажу на нижней стороне ноги для приподнимания костей плюсны и закрепляется соответственно на своде стопы. Он выполняет при ходьбе важную функцию и поэтому от него можно отказаться только, если Вы носите обувь со стелькой или супинатором.

Рекомендации по ношению

Привыкать к ношению шины Hallux valgus следует постепенно, увеличивая время ношения час за часом. Мы рекомендуем носить ее регулярно ночью и днем в течение прибл. 2-3 часов.



Пелот (А) при ношении не должен выступать за линию подушечек стопы (В), а ощущения при ходьбе должны быть приятными (рис. X).

Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS


Побочные действия

При условии правильного использования побочные действия не известны. Если возникнут местные явления сдавливания или нарушения местного кровообращения, проверьте, пожалуйста, правильность положения шины, ослабьте бандажи или снимите шину.

При необходимости проконсультируйтесь с врачом или с техником-ортопедом.


Противопоказания

Повышенная чувствительность и/или аллергические реакции при правильном применении не известны. Если пассивная коррекция вальгусного угла ($<20^\circ$) не возможна, ношение шины не рекомендуется и рекомендуется консультация с Вашим врачом.



При нижеследующей картине болезни наложение и ношение шины показано только после консультации с Вашим врачом:

Заболевания и травмы кожи на данном участке тела, в частности, при воспалительных явлениях, а также при вскрывшихся опухающих шрамах, покраснениях и перегревании, приступах подагры, ревматизме, повышенной чувствительности к сдавливанию, артрите основных суставов, полиневропатии (нарушениях кровотока и чувствительности, например, при диабете), нарушениях лимфооттока – к ним относятся также отеки мягких тканей неопределенной природы, которые возникают на других частях тела далеко от места наложения вспомогательного средства.



Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Важные указания

- Не следует носить шину при купании, на пляже и в соленой воде, так как соль и песок могут повредить шарнир шины.
- Чтобы избежать загрязнений, не рекомендуется носить шину в обуви на босую ногу. Лучше: надеть на шину и ногу носок.
- Шину можно носить в различной удобной обуви. При выборе, пожалуйста, учитывайте:
 - обувь не должна жать
 - спереди широкое отверстие в обуви для надевания
 - обувь должна удобно сидеть на ноге
- При не правильном применении ответственность изготовителя за изделие исключается.

- Предоставляется гарантия в соответствии с действующим законодательством.
- Не разрешается вносить в изделие изменения и разрешается применять только оригинальные детали **Hallufix®**, чтобы обеспечивалась полная функциональность, а также сохранялась ответственность изготовителя за изделие.
- Бандажи и боковые подушечки являются расходными материалами и в зависимости от частоты их ношения, при условии правильного использования и ухода, имеют средний срок службы не более 3 месяцев. При интенсивном использовании и частой чистке рекомендуется замена через более короткие промежутки времени.

Набор дополнительных принадлежностей Hallufix® можно приобрести в специализированных магазинах или по адресу www.hallufix.com.

Hallufix®

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Уход



Ручная стирка в мягком мыльном теплом растворе, без кондиционера



Отбеливание хлором не допускается



Не гладить



Химическая чистка не допускается








Не помещать в сушилку для белья

- Хранить всегда в сухом виде
- Не допускать контакта со средствами, содержащими жиры или кислоты
- По частям или полностью подвергать ручной стирке в мягком, бесщелочном средстве при 30 °C
- Застежки-липучки перед стиркой застегивать для сохранения длительной работоспособности и исключения повреждений
- При сушке избегать воздействия прямых источников тепла (открытый огонь, отопление, солнечные лучи)

Изделие подвергнуто испытаниям в рамках нашей системы управления качеством.
Если же тем не менее у Вас возникнет претензия, обратитесь, пожалуйста, в ближайший специализированный магазин.

CE Hallufix® - зарегистрированный товарный знак.
Выданы международные патенты.

Объяснение условных знаков

-  Соблюдать инструкцию по применению
-  Знак соответствия стандартам CE
-  Изготовитель
-  Дата изготовления
-  Обозначение партии

Расходные материалы (бандажи, пелот и боковые подушечки) имеются в наборе дополнительных принадлежностей **Hallufix®** (см. стр. 17).



Hallufix AG

Tulbeckstr. 32

D-80339 München

Тел.: +49 (89) 96 05 779-0

Факс: +49 (89) 96 05 779-99

www.hallufix.com

Электронная почта: info@hallufix.de